

Codonics® DVB5 硬盒胶片的包装和存储

技术简介

摘要

该技术简介包括了Horizon®打印机所使用的硬盒胶片的日期格式, 保质期, 存储和存储条件。该简介适用于所有尺寸的DirectVista® Blue-5 蓝基底胶片。

公告说明

胶片供应盒和Horizon胶片箱上面都有印刷各种日期。

日期格式说明

所有胶片包装盒上的日期格式均为年/月, 箱盒上面包含生产日期, 显示为 \square 保质期显示为 \square 。

保质期

胶片将会在保质期前提供最佳使用性能, 存储条件如下一条所述。如果存储在阴凉、干燥的环境中, 最佳的胶片性能可能会延长。

Horizon 胶片存储

胶片应于密封包装箱中存储。包装箱应根据包装箱箭头支持水平放置。胶片盒可以垂直堆叠2个。

对于高湿度环境, 胶片在使用前, 应始终置于原包装箱内保持密封。

从包装箱中取出胶片应一次取一盒, 并用箱中的塑料袋重新密封住剩余的胶片盒。

如果胶片冷于室温, 确保在取出单个胶片盒之前原包装箱的温度达到当时的室温, 以免造成水汽凝结在胶片上。

如果从包装箱里取出胶片, 应该把它留在纸板包装盒里。胶片盒应按垂直方向或按照原来外箱存放的方向存储。

存储条件和要求

有三类存储: 未打印胶片存储、未打印胶片运输和已打印胶片的归档(扩展)存储

- 未打印胶片存储于密封箱盒: 温度0-25° C 及相对湿度10%-70%
- 于密封箱盒中运输: 最高温度25° C
- 归档: 扩展存储(20 年) 最高温度21° C 及最大相对湿度 20-30%

技术支持

如有该技术简介未涉及的问题, 请随时联系Codonics技术支持。

电话: 400 820 5183

Email: support@codonics.com

网址: www.codonics.com

只需一个电话您就能获得一切



电话: 86 21 62787701

所有注册和非注册商标均为其各自所有者所有。如有任何更改恕不另行通知。正在申请专利。专利: www.codonics.com/ip/patents.

Codonics (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Farglory Plaza, Building B, Unit 1412
No. 317 Xian Xia Road
Changning District, Shanghai
P.R. China, 200051

科多尼克(上海)贸易有限公司
中国上海市长宁区
仙霞路317号远东国际大厦
B座1412室
电话: 86 21 62787701
传真: 86 21 62787719