

Horizon DirectVista Blue-T胶片 快速入门指南

注意：请阅读此文件

胶片工作条件：

- 温度：10 – 25°C
- 湿度：
 - 20% - 60% RH – 胶片盒开封后请于 7 天内用完
 - 20% - 50% RH – 胶片盒开封后请于 30 天内用完

胶片存储：

- 温度：10 – 25°C
- 按照包装箱上的箭头指示竖直存放。
- 在使用之前，请将媒体密封在包装箱里。
- 取出一个胶片盒之后，请重新密封包装箱。
- 如果胶片盒打开后长时间没有使用，在下次使用胶片之前请将胶片盒密封在袋子里。

相机硬件要求

- 如果一些 Horizon 相机不能打印 DirectVista Blue-T 胶片，请联系销售代表或者科多尼克技术支持来确定您的成像仪是否可以打印 DVBT。

相机软件要求

- Horizon 操作软件要求 4.2.0 或更高版本
- DirectVista Blue-T Media 功能码

总体来说

- 即使第一片槽可用，Horizon 也不能从第一输入槽打印 DVBT。
- DVBT 需要频繁地清洗橡胶滚轮。

订购上述产品请打电话！

电话：86 21 62787701

所有注册及未注册的商标为其各自所有者的财产。若规格有更改，恕不另行通知。
专利： www.codonics.com/ip/patents。

版权所有 © 2018 Codonics, Inc. 中国印刷。部分编号900-736-002.02。



Codonics (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Farglory Plaza, Building B, Unit 1412
No. 317 Xian Xia Road
Changning District, Shanghai, PRC

科多尼克（上海）贸易有限公司中国上海市长宁区
仙霞路317号远东国际大厦
B座1412室
电话：86 21 62787701
传真：86 21 62787719