

Horizon 媒介标识

设置标签指引

综述

该技术简介阐述了如何使用Horizon®系列打印机随机附带的媒介标识盒式设置标签。

预期用途

该技术简介及媒介标识盒式设置标签适用于科多尼克分销商完成新打印机的安装。

注意: Horizon系列打印机随机附带的媒介标识盒式设置标签为20张14x17的 Direct Vista蓝基胶片标签。


如何使用媒介标识盒式设置标签:

分销商应为每个打印机的安装供一盒 14x17 的 DVB 胶片。

注意: 在进行步骤二之前, 在盒子上做个标记将有助于新标签粘贴在大约相同的位置上。




从您的胶片盒上移除现有的盒式标签, 并丢弃已移除的标签。

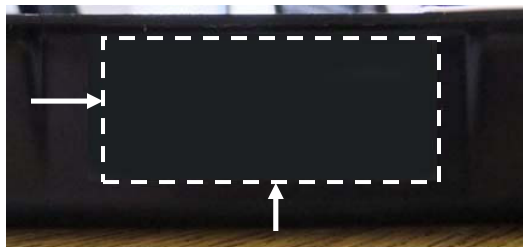

注意: 请勿直接在现有的媒介标识盒式标签上粘贴新的媒介标识盒式标签。这将导致其无法清晰阅读。

在打印机开箱后, 请移除位于智能卡门内的媒介标识设置盒式标签。

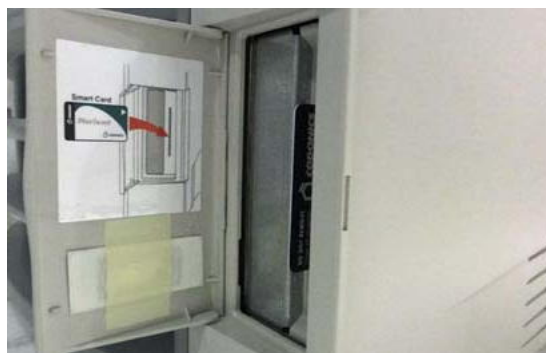

请将打印机随机携带的媒介标识设置盒式标签粘贴至胶片盒已移除标签的相同位置。

现在, 您的胶片盒已经为打印机的安装准备就绪。

技术支持

如果发生本技术简介未涉及的问题, 请于任何时候联系科多尼克技术支持。

电话: 800-820-8635 400-820-5183

电子邮件: support@codonics.com

网址: www.codonics.com

只需一个电话您就能获得一切
800.820.8635

所有注册和非注册商标均为其各自所有者所有。如有任何更改恕不另行通知。正在申请专利。

版权所有©2014 科多尼克公司。在美国印刷。部件编号: 901-473-001.01.



美国俄亥俄州, 米德尔伯格 科多尼克 (上海) 贸易有

限公司。

高地, 恩格尔伍德路17991

号, 邮编: 44130

+1.440.243.1198

+1.440.243.1334 传真

Email info@codonics.com

www.codonics.com

中国上海市长宁区仙霞路

317号B座1412室

邮编: 200051

86-21-62787701

85-21-92787719 传真

Codonics Limited KK

日本东京都港区芝浦

4-16-23 AQUACITY 9层

邮编: 108-0023

电话: 81-3-5730-2297

传真: 81-3-5730-2295