

Codonics Horizon®

打印机清洁暗盒

技术简介

综述

该文档主要描述了什么是 Horizon 打印机清洁暗盒，以及如何使用该暗盒以实现 Horizon 打印机的最佳性能。

使用指南

请按照清洁暗盒盖子上的图示进行正确操作。需注意以下几点：

- ◆ Horizon 机器的软件版本需为 1.8.3 版或以上
- ◆ 喷洒清洁液时应非常小心，以确保清洁液体不会被无意中洒出。
- ◆ **警告：**请不要在清洁暗盒上的清洁垫布仍是干着的时候使用。这样会降低机器的抓片性能。请确保在使用前，完全湿润两片清洁垫布。
- ◆ 仅使用规定的清洁液体（蒸馏水）。
- ◆ **重要！：**要清洁所有的三个进片槽。每个进片槽都要用清洁暗盒清洗。但不需要清洗完一个进片槽后就再次弄湿清洁垫布，清洁之前一次性弄湿就可以了。
- ◆ 该清洁暗盒只能清洁橡胶滚轮。不能用于清洁打印头和滚筒。若需要清洁打印头和滚筒请使 SP-00118 和 SP-00130。
- ◆ 清洁所有三个进片槽大约需要 90 秒钟。之前就已发送的打印任务不会因为清洁暗盒的使用而中断。清洁完，短暂停顿后，之前的打印任务会继续正常进行。

何时清洁

Horizon 机器的橡胶滚轮一般需每周清洁一次，若用片量低（每周用片量 <200 张）可减少清洁次数，若用片量高（每周用片量 >1000 张）则要相应增加清洁次数。清洁操作应有规律的进行，可在一天的工作结束之后，或是一天的工作开始之前，这样不会影响到工作时间机器的正常使用。另外，在发生卡片时，橡胶滚轮应及时进行清洁。

储存

清洁完后，将清洁垫布置于干净的、无灰尘的空间，自然晾干。保持清洁暗盒和清洁垫布干净无灰尘。

更换

当清洁液快用完时，请拨打清洁暗盒盒盖上的电话（1-800-444-1198 或 1-440-243-1198）申请更换，部件代码是 SP-00281，包含一个清洁液和清洁布。

若清洁暗盒损坏或丢失，请直接购买 SP-00279。

若您关于产品有任何疑问，请随时拨打科多尼克售后服务热线。

免费热线：+86-800-820-8635

Email: support@codonics.com

网站: www.codonics.com.cn

Get it all with just one call
+86-800-820-8635

所有注册和未注册的商标都属于各自相关的业主，本公司有权在不发布通知的情况下修改产品功能参数表。

版权所有 © 2012 Codonics, Inc. 文档产品编号：901-567-001.02



上海市长宁区仙霞路 317 号远东国际广场 B 座 1412 室
电话：+86 21-62787701
传真：+86 21-62787719
info@codonics.com
www.codonics.com.cn