

Horizon[®] 用图像打印机

装载DirectVista介质

技术简介


该技术简要说明如何在Horizon医用图像打印机中装载DirectVista灰度介质。

对DirectVista纸和胶片概述

Horizon医用图像打印机中使用的DirectVista灰度纸和胶片是预先在工厂密封包装好的一次性墨盒。



每个墨盒上面都有一个识别介质型号的大小、序列号和感光测定信息的条形码。墨盒的批号和使用日期也打印在了条形码标签上。

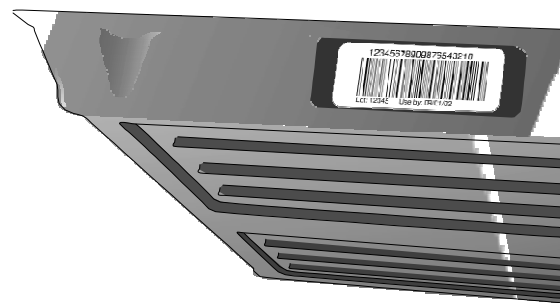


注意：不要重填墨盒；不要篡改或删除条码标签；墨盒的条码信息对保证诊断影像质量至关重要；避免以任何方式危害墨盒成像的质量和可靠性。

墨盒可以在Horizon医用图像打印机三个供应槽的任意一个中装载。但是, 装载墨盒的合理方式是在顶部插入较小的和在底部插入较大的。这样可以保证您能看见每个墨盒的标签, 而且在每个接收托盘里都有介质。

打开新墨盒

要打开一个新的墨盒，撕去墨盒表面的透明包装纸。

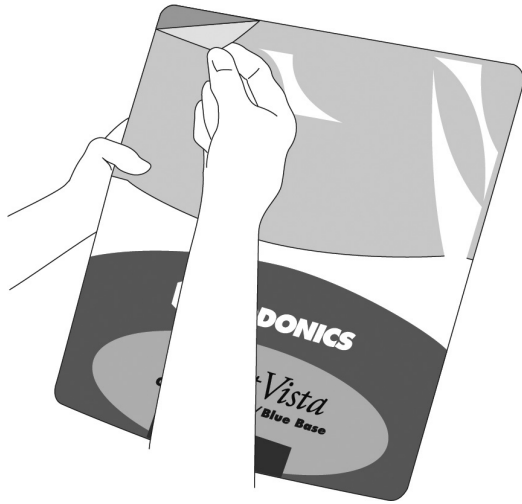


注意：不要拆下印刷盒盖，它保护介质免受灰尘和其他污染物的污染。手持和存放墨盒时始终保持正面朝上，防止介质跌落。

将墨盒插入到供应槽中

1. 按打印机的暂停键，并等待打印机进入暂停状态

注意：当纸张正在打印的时候不要移动或插入墨盒，否则将会影响纸张打印的成像质量或引起故障。请始终先暂停成像。

2. 如果您想使用正在供应槽里的墨盒，请将其从供应槽里慢慢滑出，然后取出。
3. 将新的墨盒插入到供应槽中，使墨盒的标签正面对着您，条形码置于左侧。

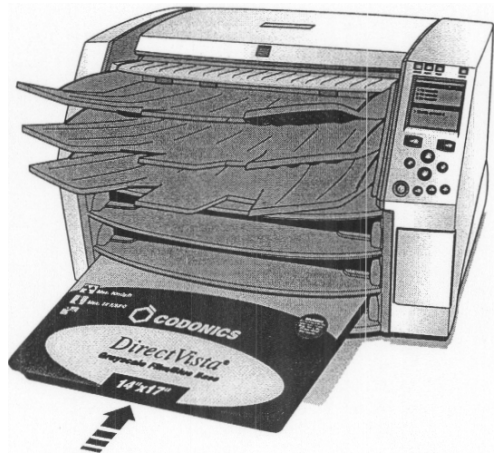

4. 将墨盒滑入供应槽直到您感觉墨盒卡入挡制动器。

注：不是所有的墨盒都是统一长度，所以大的墨盒将会比短的墨盒长出。

5. 按暂停键恢复打印。

订购上述产品请打电话！

电话：86 21 62787701

所有注册和未注册的商标均为其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。

专利：www.codonics.com/ip/patents.

版权所有 © 2018 Codonics, Inc. 中国印刷。部件号 901-601-003.01.



Codonics (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Farglory Plaza, Building B, Unit 1412
No. 317 Xian Xia Road
Changning District, Shanghai, PRC

科多尼克（上海）贸易有限公司中国上海市长宁区
仙霞路317号远东国际大厦
B座1412室
电话：86 21 62787701
传真：86 21 62787719