

概述

在使用 Horizon 用户手册的同时，这份文件将为用户在装载和处理 14*36 和 14*51 介质盒时提供适当的方法。

Horizon XL 结构

Horizon XL 医用图像打印机能够在底端的两个供应槽中装载 DirectVista 医用干式胶片 (14x36 和 14x51)。任何提供长胶片使用的供应槽必须安装一个输入盒框架(ICF)，不同于其他用于 Horizon 的介质盒，长胶片介质盒需要一个特殊的框架来支持更大的尺寸和增加的重量，如果在供应槽中已经安装了 ICF，那么那个供应槽只能供长胶片介质盒使用，若要在较低的供应槽中使用较小的墨盒，需移除 ICF。

介质处理及存储

长胶片 14*36 和 14*51 包装成一次性墨盒，里面含有 25 张胶片，4 个墨盒装在胶片箱，这些墨盒需要存储在其旁边，建议将这些墨盒放在胶片箱的内包装箱里，同时也建议将这些墨盒置于塑料袋内再放入内包装箱。

Multi-media Imager




载入 13*36 或 14*51 DirectVista 医用干式胶片


从包装箱内取出一次性长胶片墨盒，然后将其放置于桌上。




拆下墨盒前盖，拿出标签并撕下。

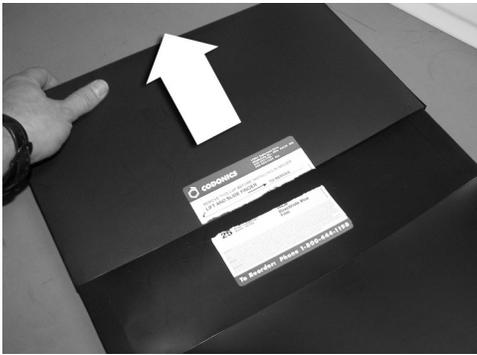


然后取下墨盒的前盖并丢弃。

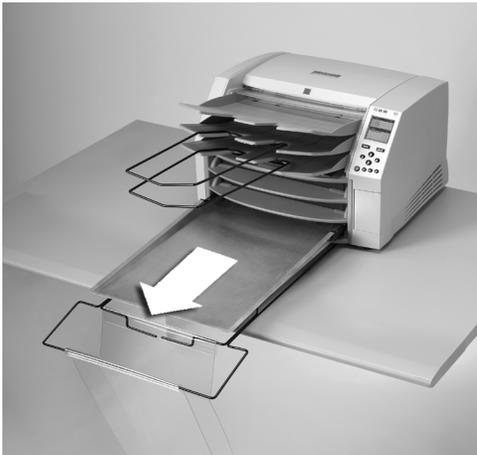

将 ICF 从打印机里拉出 2 英尺（50 厘米）

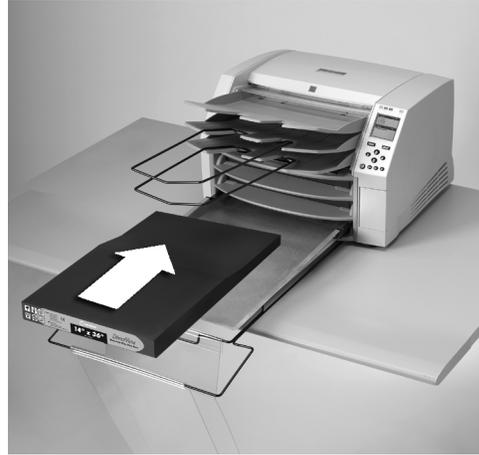

然后将墨盒放入 ICF 中直到恰好靠近 ICF 底端的 2 个黑点

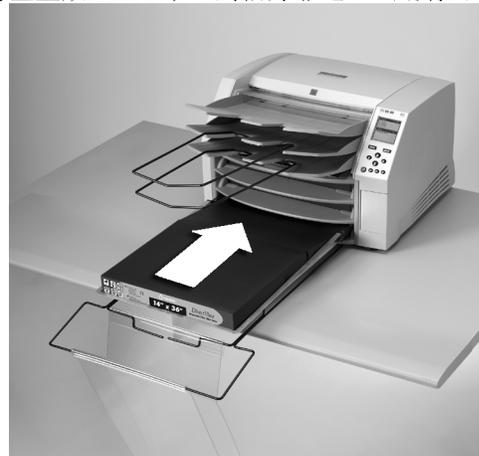

然后将装有墨盒的 ICF 插回打印机

当更换空盒的时候，需要先将 ICF 拉出，然后插入新安装的墨盒，以便打印机识别新的墨盒。

所有支持，只需一个电话：

800-820-8635

所有注册和未注册的商标均为其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。专利申请中。

版权所有 © 2016 Codonics, Inc. 在美国印刷。部件号 901-603-001.01



17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130
USA
+1.440.243.1198
+1.440.243.1334 Fax Email
info@codonics.com
www.codonics.com

科多尼克（上海）有限公司
中国上海市长宁区仙霞路317
号远东国际大厦1412室
邮编：200051
电话：+86.21.62787701
传真：+86.21.62787719