

Horizon® 医用图像打印机


清洁指引

技术简介

以下清洁工具包可用以帮助您正确地维护 Horizon 医用图像打印机：

- ◆ 此 Horizon 滚筒及打印头清洁工具包（目录号 SP-00118）包含您清洁打印头及接头、滚筒、供片导杆及拾片胎将需要的特殊热敏打印头及滚筒滚轴湿巾。
- ◆ 此 Horizon 条码阅读器/坐式盒状传感器清洁套装（目录号 SP-00130）包含您清洁条码阅读视窗及坐式盒状传感器将需要的棉签。

作为定期维护的一部分，或当图像质量或印刷性能会显著降低时，您应执行此清洁流程。见 Horizon 医用图像打印机用户手册，推荐维护计划及故障排除表格。

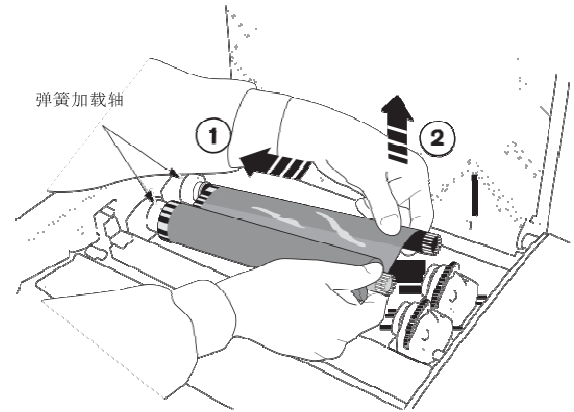

5. 从打开顶盖菜单中选择移动色带架选项。
6. 按  键向下移开色带架。

清洁打印头、接头、滚筒及供片导杆

1. 按打印机  键。

2. 从主菜单，选择打开顶盖菜单选项。

打印机暂停，最长等待一分钟让内部部件冷却，顶盖会部分弹开。

3. 完全打开顶盖。

警告：打印机上盖打开后，只能触碰那些标有绿色标签的内部组件。摘掉戒指、领带、首饰和其它装饰物，把头发扎到后面，以免它们掉进打印机或被其卡住。


若色带已加载，请转到第 4 步。否则，转到第 7 步。

4. 取出彩带。

注意：色带盒没有装进打印机时，要细心防止污物和灰尘落在其上。不要把它放在桌面上，因为静电会吸附桌面上的灰尘。

7. 找到打印头和转换盘。

警告：热敏打印头可能发烫。

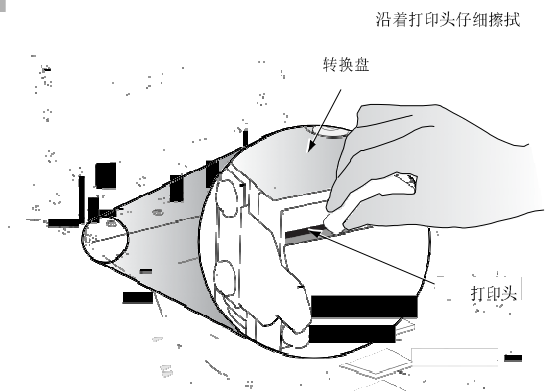


8. 使用打印头清洁抹布沿整个打印头线适度用力仔细来回擦拭直到打印头彻底干净为止。清洁抹布可能变色。

警告：在清洁打印头时，避免接触到锋利的打印头尖端。

小心：清洁热敏打印头时只能用打印头清洁抹布。另外，不要用手指触摸打印头的玻璃表面，因为这样有可能损坏打印头。

9. 清除掉转换架上的灰尘和其它污物。
10. 观察打印机内部并找到橙色或白色滚筒和进纸导向杆。

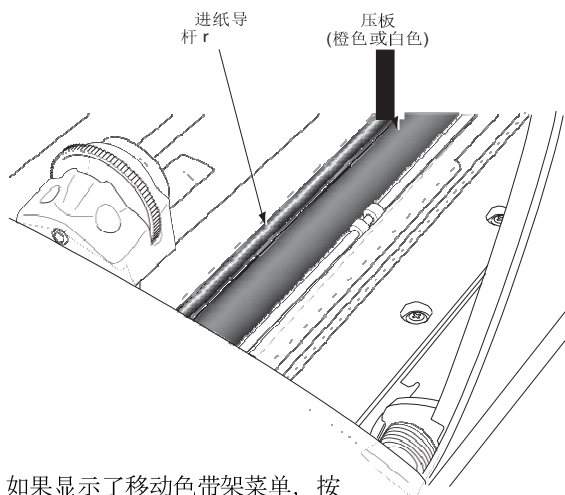

11. 如果显示了移动色带架菜单，按 键返回到打开顶盖菜单。
12. 使用滚筒清洁抹布清除掉进纸导向杆上的灰尘和其它污物。

13. 从打开顶盖菜单中选择旋转压纸卷筒选项。

显示旋转压纸卷筒菜单。

14. 按 或 键转动压纸卷筒。

15. 使用压纸卷筒清洁抹布从一边倒另一边来回擦拭整个压纸卷筒，直到看不见污物为止。不要前后擦拭。

小心：清洁滚筒时只能用滚筒清洁抹布。使用打印头清洁抹布清洁滚筒有可能损坏滚筒。

16. 重复步骤 14 和 15 至少六次以确保滚筒完全转动清洁整个表面。


17. 等所有清洁组件完全晾干。

小心：使用打印机前，打印头必须完全干透。打印头湿的时候加热会损坏打印头。

若您须重新装载色带，请转到步骤 18。否则转到步骤 20。

18. 转到移开色带架菜单，然后按 键移开色带架，这样就可以装入色带盒了。

19. 重新装载色带。

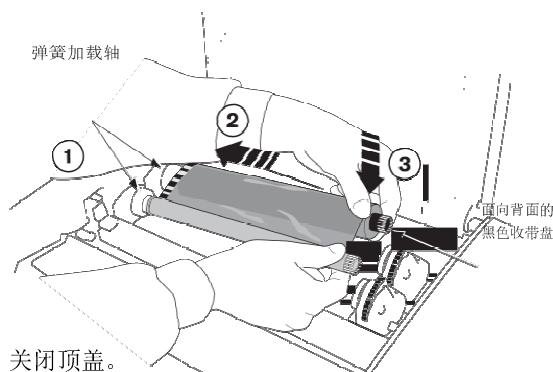


20. 关闭顶盖。

等上几秒钟后状态屏幕会显示，如果有打印任务排队等候，则打印出一份摘要。


清洁取纸轮

1. 按打印机的 键，等到打印机进入暂停状态。
2. 取下接收盘。

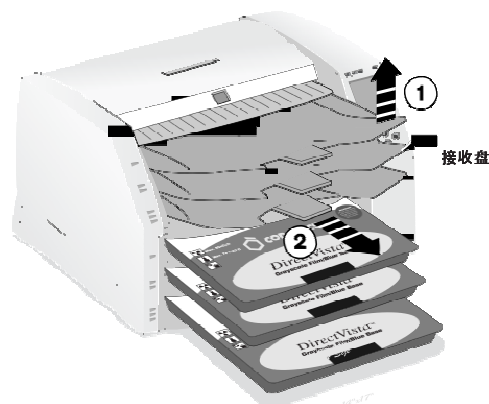


警告：接收盘取下时，只能够接触颜色为绿色的内部组件。摘掉戒指、领带、首饰和其它装饰物，把头发扎到后面，以免它们掉进打印机或被其卡住。

3. 把接收盘放置在一个平坦的表面上。

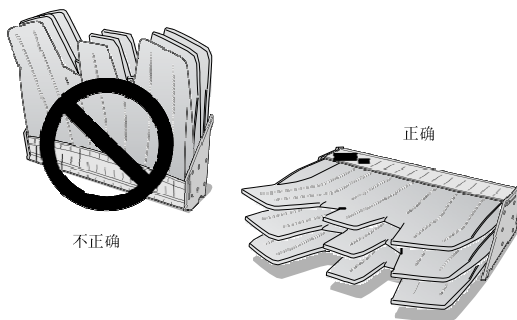

4. 从供纸槽中取下供片盒。
5. 找到取纸轮。有 3 个取纸器，每一个对应一个供纸槽。

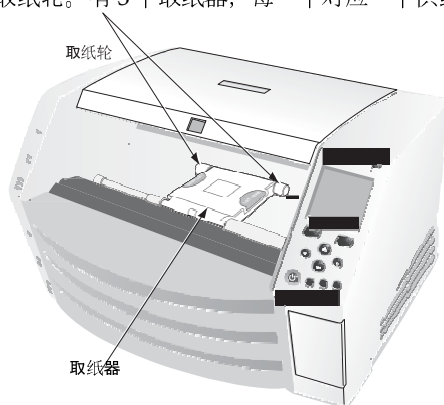

6. 用滚筒清洁抹布环绕擦拭每一个取纸轮。清洁抹布可能变色。

小心：清洁取纸轮时只能用滚筒清洁抹布以防损坏取纸轮。另外，请勿触摸取指轮；手指上的油性物质很难清除掉，并且最终会损坏取纸轮。

7. 等取纸轮完全晾干。

8. 重新装上接收盘和所有取下的介质供片盒。等上几秒钟后状态屏幕会显示，如果有打印任务排队等候，则打印出一份摘要。

清洁条码阅读器及坐式盒状传感器

条码阅读器及坐式盒状传感器应被清洁每 12 个月，或打印机发生阅读条码故障，或发生检测插入或删除供应盒故障时。

清洁条码阅读器及坐式盒状传感器


1. 按 **PAUSE** 键，等到打印机进入暂停状态。
2. 取下所有供应槽中的供片盒，确保接收盘在位并且顶盖处于关闭状态。
3. 按 **MENU** 键。
4. 从主菜单选择下列选项：

功能

清洁条码阅读器


5. 遵照控制面板上的说明执行操作。

在说明的有些地方，提示您取下出纸盘。

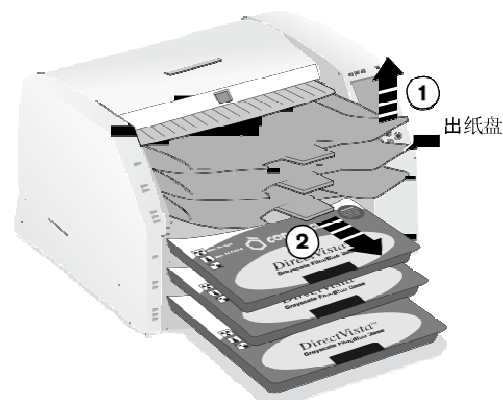


警告：接收盘取下后，只能够接触颜色为绿色的内部组件。摘掉戒指、领带、首饰和其它装饰物，把头发扎到后面，以免它们掉进打印机或被其卡住。

6. 接收盘取下后，放置在一个平坦的表面上。


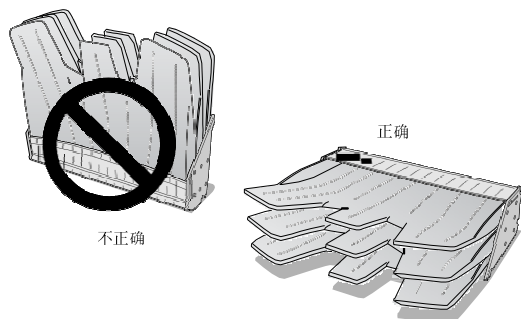


7. 当提示清洁条码阅读器时，准备一根干净的棉签：如下图所示去除棉签的密封包装并挤压棉签管。

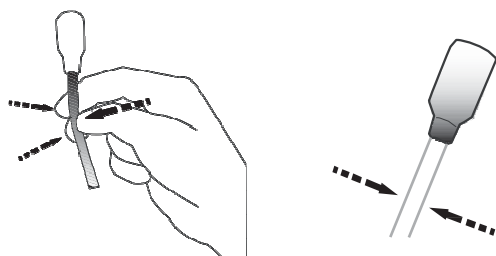

小心：只能使用条码阅读器及坐式盒状传感器清洁套装提供的清洁棉签。若同时清洁条码阅读器及坐式盒状传感器清，请分别使用新的棉签。

8. 如下图所示找到条码阅读器及坐式盒状传感器。

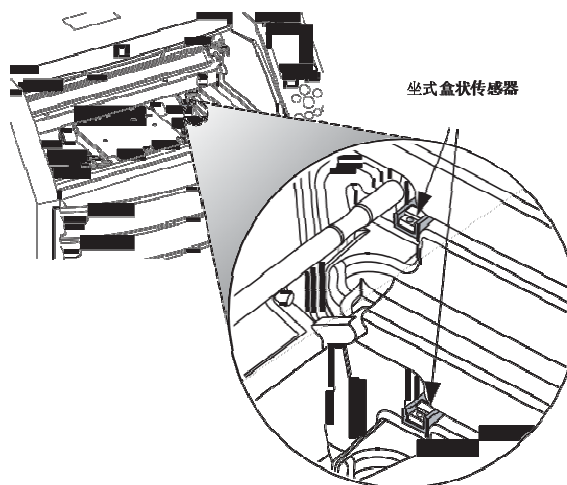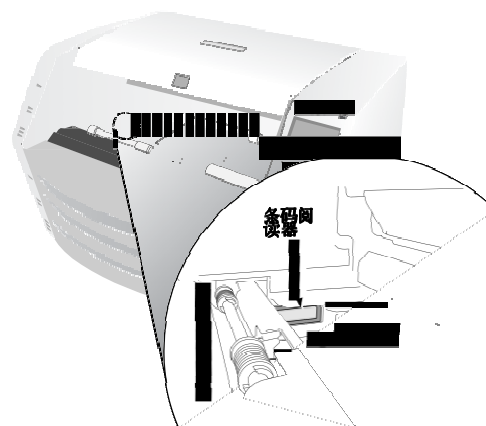

9. 使用清洁棉签擦拭条码阅读器及坐式盒状传感器，直到除去所有的灰尘和其它污物。

10. 在说明的有些地方，提示您取出出纸盘及供纸盒。

完成清洁流程后，按 **MENU** 键显示状态屏幕，如果有作业队列，则继续打印。

所有支持，只需一个电话：

电话：86 21 62787701

所有注册和未注册的商标均为其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。

专利： www.codonics.com/ip/patents.

版权所有 © 2018 Codonics, Inc. 中国印刷。部件号 901-604-002.01



Codonics (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Farglory Plaza, Building B, Unit 1412
No. 317 Xian Xia Road
Changning District, Shanghai, PRC

科多尼克（上海）贸易有限公司中国上海市长宁区
仙霞路317号远东国际大厦
B座1412室
电话：86 21 62787701
传真：86 21 62787719