

摘要

该技术简介包括了Codonics NP-16xx, EP系列 和 Horizon医用干式胶片中介质的日期格式, 保质期, 存储和存储条件。该简介适用于所有型号和所有尺寸的介质。

公告说明

介质供应盒和Horizon介质箱上面都有印刷各种日期。NP-16xx 介质的日期在介质盒和箱盒上都可以找到。

日期格式说明

所有介质包装盒上的日期格式均为年/月, 箱盒上面包含生产日期, 显示为 , , 保质期, 显示为 。

保质期

介质将会在保质期前提供最佳使用性能, 存储条件如下一条所述。如果存储在阴凉、干燥的环境中, 最佳的介质性能可能会延长。

Horizon 介质存储

如果介质在箱盒内, 按下面情况箭头所指示的方式存储。对于高湿度环境, 建议在使用前使介质的原包装保持密封。介质盒可以垂直堆叠2个, 如果从箱盒里取出介质, 应该把它放在棕色的纸板箱里。介质箱盒应按垂直方向或在同一个方向上的相同方向存储。介质墨盒从箱盒中取出堆放的高度不超过5个高度, 旋转90度时需要标签相向。

存储条件和要求

有三类存储: 未打印介质存储、未打印介质运输和已打印介质的档案(扩展)存储。

◆ DirectVista®

医用干式胶片的存储条件
未打印的密封箱盒:
最高温度24° C和最大相对湿度70%
运输中的密封套箱: 最高温度24° C
归档: 年限 (20 年) 最高温度21° C
相对湿度 20-30%。

◆ DirectVista®

纸张/白医用干式胶片存储
未打印: 最高温度24° C和相对湿度 20-40%
运输中: 最高温度 24° C
存档: 年限 (30 年) 最高温度 21° C
相对湿度20-30%

◆ ChromaVista®

纸张/白医用干式胶片存储
未打印: 最高温度 24° C和相对湿度20-40%
运输中: 最高温度 24° C
存档: 年限 (20年) 最高温度 21° C
相对湿度 20-30%

技术支持

如有问题, 请随时联系Codonics技术支持

电话: 86 21 62787701
邮箱: china@codonics.com
网址: www.codonics.com.cn

所有支持, 只需一个电话:

电话: 86 21 62787701

所有注册和未注册的商标均为其各自所有者的财产。规格如有变更, 恕不另行通知。
专利: www.codonics.com/ip/patents.



Codonics (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Farglory Plaza, Building B, Unit 1412
No. 317 Xian Xia Road
Changning District, Shanghai, PRC

科多尼克(上海)贸易有限公司
中国上海市长宁区
仙霞路317号远东国际大厦
B座1412室
电话: 86 21 62787701
传真: 86 21 62787719